

Rollator



Farebné prevedenie rámu:

Strieborné	Katalógové č.: 31 000
Modré	Katalógové č.: 31 002
Červené	Katalógové č.: 31 004

Údržba:

- Rollator treba pravidelne kontrolovať každých šesť mesiacov, predajca tým môže odhaliť poškodenie a opotrebovanie a prijať príslušné opatrenia.
- Ak ste ako užívatelia požiadali o pravidelné kontroly profilu pneumatík a účinnosti brzdy, ak si všimnete nejaké chyby, obráťte sa na predajcu s dôverou.
- Pravidelne kontrolujte skrutky, zaistovaciu páčku a skrutku pre ich celistvosť a pevnosť.
- Konštrukciu je možné čistiť vodou a jemným čistiacim prostriedkom, aby sa do rúrok nedostala žiadna voda. Pri ľahšom znečistení môže byť tiež použitý hladký povrchový čistiaci prostriedok (napríklad čistiaci prostriedok na sklo).

Bezpečnostné pokyny:

- Telesná hmotnosť užívateľa nesmie presiahnuť 125 kg!
- Použite Rollator len vtedy, keď je plne rozložený a bezpečnostné zariadenie je dobre zaistené!
- Pred každým použitím skontrolujte, či sú blokovacie páčky pevne utiahnuté a či sú páčky smerované nadol.
- Rollator nie je vhodný na prekonanie prekážok, ako sú schody, schody, svahy alebo svahy.
- Použite Rollator len na pevnej a rovnej ploche. Vyhnite sa prekážkam ako sú koľajnice, poklopy, rošty a poškodené cestné komunikácie, hrozí tu nebezpečenstvo zaseknutia kolies.
- Rollator nesmie byť použitý ako podpera pri stojacej vzpriamenej polohe, pri sedení alebo pri preprave ľudí.
- Nevyužitý alebo odstavený Rollator musí byť vždy zaistený proti prevráteniu zablokováním brzd.

- Brzdy pracujú priamo na povrchu pneumatiky, takže brzdný účinok závisí od stavu pneumatík. Pred každým použitím skontrolujte stav pneumatiky! Ak si nie ste istí, obráťte sa na predajcu.
- Na vlhkých, mokrych alebo zľadovatených / snehom pokrytých povrchoch nemáte žiaden alebo len obmedzený brzdný účinok a existuje riziko klzania. Buďte pripravení na tieto nebezpečenstvá pri jeho použití.
- Nákupný koš môžete použiť maximálne na 10 kg batožiny.
- Pri ohnutí alebo zdeformovaných častiach Rollator už nepoužívajte!
- Raz za mesiac sa musí skontrolovať tesnosť všetkých upevňovacích skrutiek.
- Nenechávajte deti bez dozoru s Rollatorom!
- Na držiadlách nevesajte tašky, vrecká ani iné podobné predmety!

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia,
- normálne opotrebenie alebo používaní, ako aj porúch, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu alebo použiteľnosť zariadenia.

Technické zmeny a prílohy, ako aj nevhodná údržba, rušia záruku a zodpovednosť za výrobok vo všeobecnosti. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré sú v záujme technického zlepšenia.

Pred prvým použitím:

Inštalácia a prvé overenie by už mali byť vykonané vaším predajcom. Potom by mal s vami pracovať, aby nastavil Rollator na vaše individuálne merania a potreby. Ak nemôžete získať Rollator od svojho špecializovaného predajcu, odporúčame vám najprv skontrolovať úplnosť dodávky.



Prehľad:

1. riaditeľné predné kolesá (plné-PU peny pneumatiky)
2. tuhé zadné kolesá (plné-PU peny pneumatiky)
3. spodná polička zo sieťkou
4. priečna tyč s háčikmi na koš + sedátkom
5. bezpečnostná zámok sklopenia
6. košík
7. uzamknutie pre výškovo nastaviteľné rukoväte

Zloženie / Inštalácia:

Ak ste dostali Rollator v zabalenom stave (v krabici) , postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte Rollator z krabice.
- Umiestnite Rollator pred seba s prednými riadiacimi kolieskami smerujúcimi dopredu.
- Zasuňte dodané skrutky zvnútra von cez otvory na koncoch potrubia. Na hlavu skrutky má malý nos, skontrolujte, či tento nos zaberá do zodpovedajúcej drážky vo svorke.
- Teraz utiahnite zaistovacia páčka na vyčnievajúce lanko bez jeho utiahnutia. Zasuňte rukoväte do koncov rúr tak, aby kľučky smerovali dozadu.

- Nastavte výšku rukoväte a utiahnite zaistovaciu páčku otočením napevno. Upozornenie: Upozorňujeme, že najmenej 10 cm (vyznačená oblasť) rukoväte musí zostať v trubici!
- Nastavte blokovacie páčky tak, aby smerovali nadol. Za týmto účelom potiahnite zaistovacie páčky smerom von a otočte ich do polohy smerujúcej nadol. Určujúci účinok páky nie je ovplyvnený.

Rozloženie pre priame použitie:

- Pre sklopenie Rollatora najprv vytiahnite jeden z dvoch zadných vzpier.
- Potom zatlačte priečnik smerom nadol, až kým sa nezastaví.
- Potom uvoľnite zámok sklopenia tak, aby sa zabránilo Rollatora zrolovaniu počas používania.



Sklopenie:

- Ak chcete Rollator zložiť, najprv odstráňte nákupný kôš a zásobník.
- Potom sklopte zámok sklopenia.
- Potom môžete sklopiť Rollator tak, že vytiahnete prvú priečnu lištu.



Nastavenie výšky kľučiek:

- Uvoľnite blokovacie páčky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
- Potom môžu byť rukoväte vtlačené do trubice alebo povytiahnuté. Pri vyťahovaní skontrolujte, či v trubici valčeka zostáva aspoň 10 cm (označená oblasť na rukoväti).
- Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa znovu utiahnu blokovacie páčky.
- Po utiahnutí musia byť páčky nastavené tak, aby smerovali nadol. Za týmto účelom vytiahnite zaistovacie páčky smerom von a otočte ich do polohy smerujúceho nadol.

Prevádzka brzd:

- Brzdovú páku pomaly vytiahnite smerom nahor.
- Brzdy možno zistiť stlačením brzdovej páčky smerom dole.
- Ak chcete uvoľniť zámok, postačuje mierne vytiahnutie brzdovej páky.

Plastový zásobník:

- Na inštaláciu vložte zásobník do otvorov na doske sedadla.
- Pozor! Zásobník nie je vhodný na prepravu horúcich alebo ostrých predmetov.

Nákupný košík:

- Nákupný košík je zavesený na hákoch na ľavej a pravej strane pod sedadlom.

Doska sedadla:

- Doska sedadla by vám mala umožniť krátkodobý odpočinok alebo uvoľnenie nohy v krátkom čase.
- Doska sedadla nie je náhradou za stoličku. Predtým než si sadnete, vyberte plastový zásobník.
- Potom zabrzďte brzdú a skontrolujte, či je Rollator zabezpečený proti pohybu.
- Sedzte nehybne a rovno na doske sedadla.
- Nenakláňajte sa diagonálne proti valčekom.

Technické údaje

Rollator 31 000 - 004			
Materiál:	Trubkový oceľový rám	Nastaviteľná výška rukoväte:	79 – 98 cm
Farba	strieborná	Rozmer Rollatora:	60 x 72 x 98 cm
Výška sedadla	61 cm	Max. zaťaženie (batožina)	10 kg
Šírka sedadla	38 cm	Max. únosnosť Rollatora	125 kg
Životnosť	5 rokov		