

Podávač „SUNDO“

26024 – 61 cm

26030 – 76 cm

26032 – 81 cm

26035 – 90 cm



Bezpečnosť:

- Oboznámte sa s funkčnosťou podávača a zaobchádzajte s ním správne.
- Objekty nesmú presiahnuť hmotnosť približne 3 kg.
- Uistite sa, že predmet je pevne uchopený kliešťami.
- Nechytajte horúce alebo horiace predmety, ako napr. sviečky alebo cigarety.
- Ubezpečte sa, že integrovaný magnet je udržiavaný mimo dosahu elektronických zariadení. Tieto môžu byť poškodené magnetickým poľom.

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Z vylúčenej záruky vyplývajú škody spôsobené nevhodným používaním, bežným opotrebovaním alebo používaním, ako aj vady, ktoré majú len malý vplyv na hodnotu alebo použiteľnosť zariadenia.

Technické zmeny, zmeny a rozšírenia a nesprávne údržbárske práce vedú k vypršaniu záruky a zodpovednosti za výrobok.


Vyhradzujeme si zmeny, ktoré slúžia technickému zlepšeniu.

Využitie:

Podávač SUNDO uľahčuje zdvíhanie a odkladanie ľahkých objektov pre ľudí s obmedzenou funkciou ruky alebo prstov. Navyše slúži pre ľudí so zníženou pohyblivosťou pri zdvíhaní predmetov, pretože sa nemusia ohýbať ani natahovať (napr. aj po operácii bedrového kĺbu).

Popis:

Podávač "SUNDO" je dobre vyvážený, robustný podávač s plastovou rukoväťou **1**, ktorá umožňuje plynulú prevádzku. Rukoväť v tvare pištole s ovládacím mechanizmom v pohodlnej veľkosti sa dá použiť s niekoľkými prstami súčasne jednoducho a bezpečne, čím sa znižuje námaha. Vstavaný magnet **2** na čelusti umožňuje zdvíhanie malých kovových predmetov, integrovaný hák **3** uľahčuje uchytenie predmetov. Jedna čelusť je pogumovaná **4**, druhá čelusť je drážkovaná **5** a preto sa z nej veci neskĺznu.

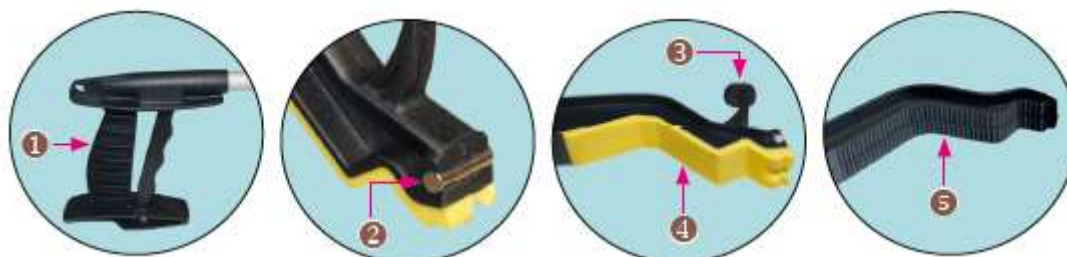

Dezinfekcia / čistenie:

- Pri čistení nepoužívajte ostré, abrazívne predmety alebo čistiace prostriedky.
 - Všetky chrómované kovové časti sa najlepšie čistia vlhkou handričkou za použitia jemných čistiacich prostriedkov pre domácnosť.
 - Čistenie plastových prvkov sa najlepšie vykoná pomocou navlhčenej tkaniny bez umývacieho prostriedku. Pri starostlivosti o plastové povrchy by sa mal použiť špeciálny prípravok vhodný na plasty.
 - Podávač sa môže dezinfikovať komerčným dezinfekčným prostriedkom bez chlóru.
- Dôležité upozornenie: Pri použití dezinfekčných prostriedkov je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.



Poznámka:

- ◀ Stlačte rukoväť podávača jednou rukou. Pri stlačení sú čeľuste zovreté, pri uvoľnení sa čeľuste otvárajú.

Podávač „Sundo“	
Materiál:	Hliník, plast
Dĺžka:	26024: 61 cm 26030: 76 cm 26032: 81 cm 26035: 90 cm
Šírka roztvorenia čeľustí:	9,5 cm
Váha:	26024: 150 g 26030: 190 g 26032: 200 g 26035: 215 g
Max. záťaž:	3 kg