

Bezpečnostné pokyny:

- ▶ Telesná hmotnosť užívateľa nesmie presiahnuť 130 kg!
- ▶ Sprchovú stoličku smú používať iba osoby, ktoré môžu udržať rovnováhu pri sedení
- ▶ Ak sú časti sprchovej stoličky ohnuté alebo deformované, stolička nesmie byť použitá
- ▶ Všetky 4 nohy musia byť nastavené na rovnakú výšku
- ▶ Pred každým použitím treba skontrolovať stabilitu stoličky
- ▶ Pri nastavovaní výšky sa uistite, že sú tlačidlá viditeľné a vystupujú z otvoru
- ▶ Kvôli bezpečnosti nemôže byť počas používania pod stoličkou použitá podložka alebo gumové protišmykové podložky.
- ▶ Používanie mydlových alebo šampónových výrobkov zvyšuje riziko kĺzania
- ▶ Sprchová stolička nie je vhodná na dlhšie sedenie
- ▶ Nepoužívajte sprchovú stoličku v saune
- ▶ Pre optimálnu bezpečnosť je vhodné pravidelne kontrolovať gumové násadce * a v prípade potreby ich vymeňte

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, normálnym opotrebením alebo poškodením, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu alebo funkčnosť výrobku. Technické zmeny, konverzie a prílohy, ako aj nesprávne údržbové práce spôsobia neplatnosť záruky a zodpovednosti za výrobok vo všeobecnosti. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré sú v záujme technického zlepšenia.

* K dispozícii ako príslušenstvo: Náhradná gumená kapsula, položka č. 10 000-01