

Použitie:


Pomôcka sa používa na bezpečný vstup a výstup z vane. Pripevňuje sa jednoduchým utiahnutím zaistovacích skrutiek.

Kontraindikácie:

Slabí úchop, slabosť horných končatín, závrat

Montáž:

- Miesto, na ktoré má byť pomocná pomôcka nainštalovaná, nesmie byť mastné ani od mydla.
- Najprv musíte odstrániť biele krytky z blokovacích skrutiek ❶.
- Uvoľnite aretačné skrutky ❶.
- Potom umiestnite pomôcku na okraj vane, (krátkymi nohami dovnútra).
- Utiahnite dve zaistovacie skrutky.
- Skontrolujte bezpečné prispôsobenie pomôcky na vstup do vane napr. pomocou trasenia, zapierania atď. Pomôcka sa môže použiť iba s dostatočnou stabilitou.
- Nakoniec vráťte biele krytky späť.

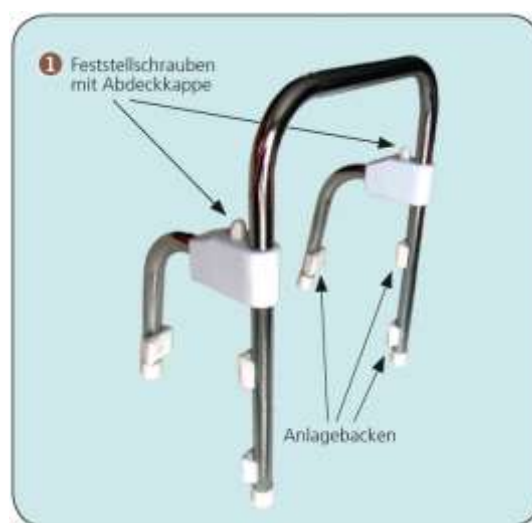

Pozor! Nevhodné pre plastové vane!

Kat. číslo 12300 – Držadlo pre vstup do vane			
Materiál:	Nerez/plast	Výška rukoväte:	17 cm
Farba:	Chróm/biela	Váha:	1 kg
Výška:	42 cm	Max. zaťaženie:	100 kg
Šírka:	30 cm	Pre vane s hrúbkou:	5-12 cm

Čistenie a starostlivosť:

Pomôcku pre vstup do vane môžete čistiť komerčnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, uistite sa, že neobsahujú žiadne oleje a tuky. Ak je to potrebné, môžu sa použiť komerčné dezinfekčné prostriedky bez chlóru. Dôležité upozornenie: Pri použití dezinfekčných prostriedkov je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

Doba použiteľnosti je približne 10 rokov, je možné opakované použitie.

Bezpečnostné upozornenie:

- Maximálna nosnosť je 100 kg.
- Pred každým použitím sa musí skontrolovať bezpečné zaistenie držadla na vstup do vane.
- Nepoužívajte oleje alebo mastné prísady do kúpeľa, pretože to zvyšuje riziko pošmyknutia!
- Používajte iba originálne náhradné diely.

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Vylúčené zo záruky: Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebovaním a poškodením, ktoré má len nepatrný vplyv na hodnotu alebo funkčnosť zariadenia. Technické zmeny a prílohy, ako aj nevhodná údržba, rušia záruku a zodpovednosť za výrobok vo všeobecnosti.

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú v záujme technického zlepšenia.