

Návod na montáž a obsluhu

Sprchová stolička s lakt'ovou opierkou

Obj. č.: 10200



Sprchová stolička s lakt'ovou opierkou a operadlom

Obj. č.: 10210



Skladacia sprchová stolička s lakt'ovou opierkou a operadlom

Obj. č.: 10220



Technické údaje:


- Materiál: rám-hliník, sedadlo, operadlo – polypropylen
- Farba: biela
- Dĺžka: 53 cm, rozmer sedačky – 41x42 cm
- Šírka: 54 cm
- Váha: model: 10200-3,3 kg, model: 10220 – 4,25 kg
- Výška sedenia: 46-54 cm
- Maximálne zaťaženie: 120 kg
- Životnosť: 10 rokov



Montáž:

Pripevnite stredný diel k bočnej časti a pevne ho zaistíte skrutkou, podložkou a maticou. Kolíky na strednom kuse by mali smerovať dopredu. Potom stlačte nadol sedaciu plochu na rám.

Nastavenie výšky:

Výška sprchového sedadla je nastavená na nohách. Za týmto účelom musí byť pridrzná svorka odstránená. Teleskopická rúrka sa potom môže zasunúť na požadovanú dĺžku. Nakoniec je oporná svorka úplne zapnutá.

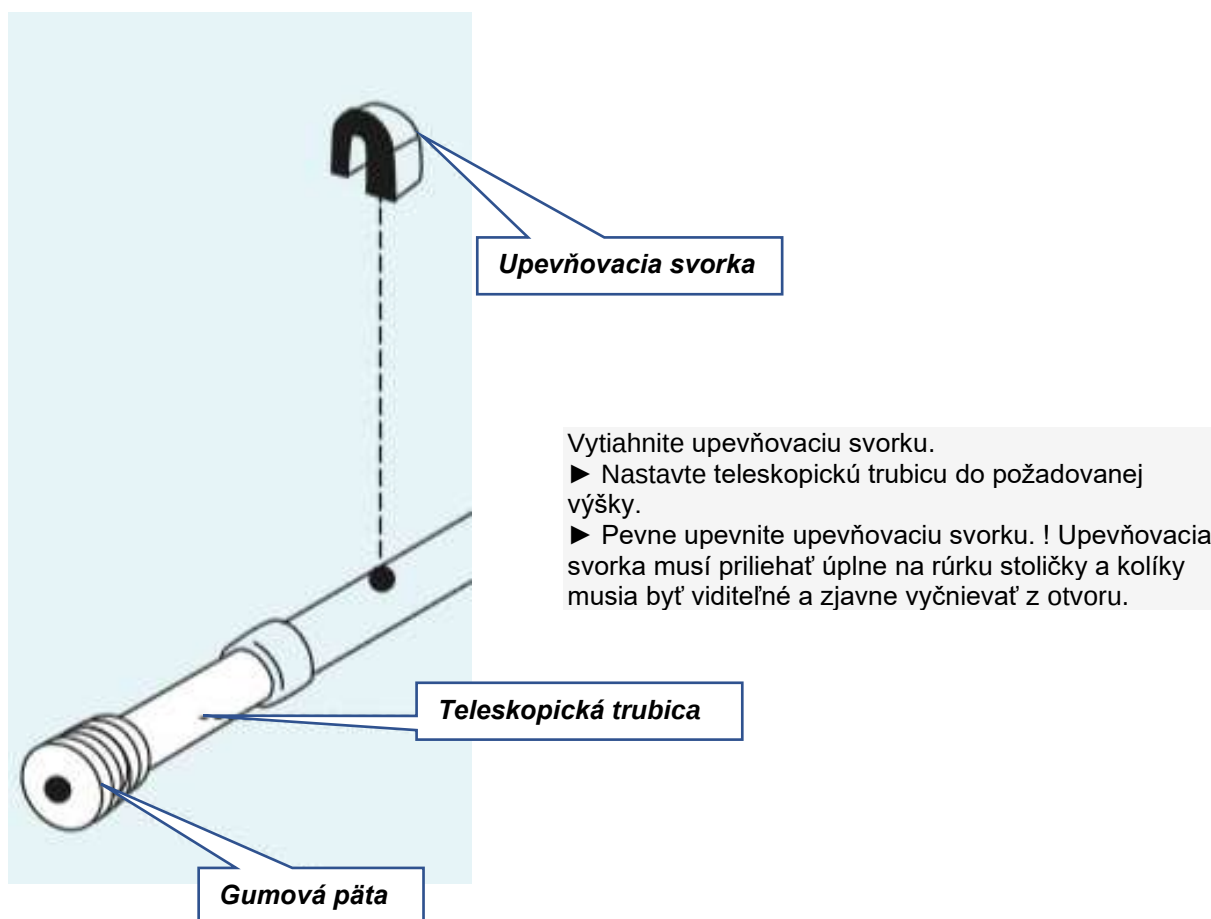

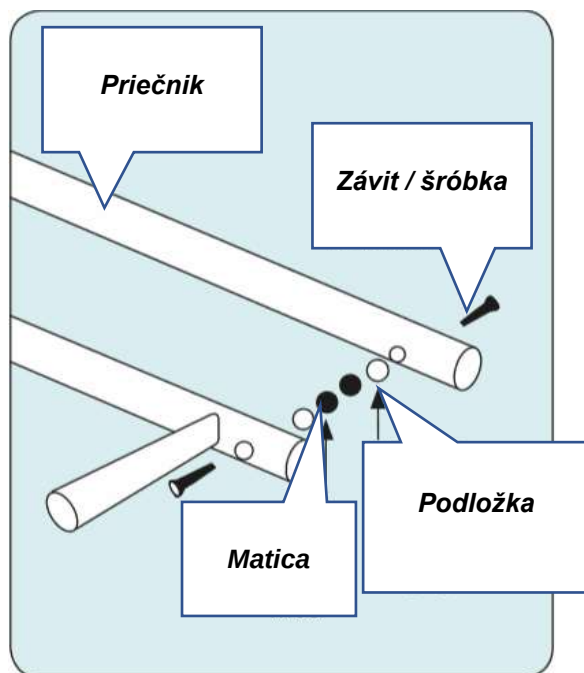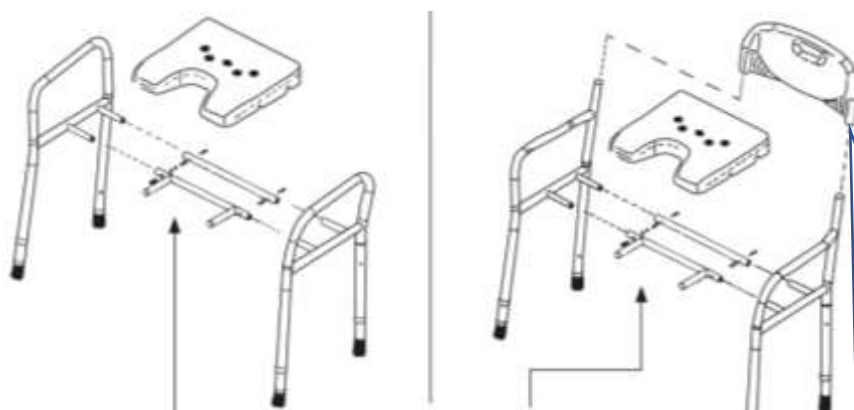

U modelov s opierkou je pri zapadnutí posunutím cez bočnú časť, až do mechanickej zarážky. Potom stlačte malé biele plastové skrutky vľavo a vpravo do príslušných otvorov, aby ste sa vyhli neúmyselnému posúvaniu chrbta.

Určený účel:

Sprchová stolička s hygienickou časťou ponúka možnosť posediť pod sprchou.

Pred prvým použitím:

- Skontrolujte, či je výrobok kompletný a bez poškodenia.
- Požiadavka na priestor je cca. 53 x 54 cm.
- Všetky upevňovacie svorky musia byť bezpečne uzatvorené.

Ako používať:

Pred použitím ošetrovateľ musí zabezpečiť stabilitu sedadla. Ak sa sedadlo nakláňa, nastavte ho tak, aby bolo stabilné. Stolička musí vždy poskytnúť podporu na posadenie sa a na postavenie sa. Vždy sedzte vzpriamene a uprostred sprchy, ak nie, hrozí nebezpečenstvo prevrátenia alebo sklznutia!

Čistenie a dezinfekcia:

- Sprchovú stoličku je možné čistiť štandardnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť, avšak zabezpečte, aby čistiaci prostriedok neobsahoval oleje, tuky alebo brúsne látky.
- Prístroj možno dezinfikovať pomocou komerčne dostupného dezinfekčného prostriedku bez chlóru.

Dôležité: Pri používaní dezinfekčných prostriedkov vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.

Údržba: Samostatná údržba sa nevyžaduje v súlade s bezpečnostnými pokynmi.

Informácie pre opätovné použitie:

- ▶ Sprchová stolička musí byť pred opätovným použitím vyčistená a podrobená údržbe - musia sa dodržiavať pokyny (Smernica o zdravotníckych pomôckach).
- ▶ Čistenie by sa malo vykonávať v súlade s pokynmi pre zabezpečenie hygieny v nemocničnom prostredí a pre zabezpečenie prevencie infekcie.

Bezpečnostné pokyny:

- ▶ Telesná hmotnosť užívateľa: maximálne 120 kg!
- ▶ Hrozí nebezpečenstvo rozdrvenia, ak sú ruky alebo konce umiestnené v medzere medzi rámom a povrchom sedenia!
- ▶ Počas montáže a pri zničení zariadenia hrozí aj nebezpečenstvo rozdrvenia.
- ▶ Sprchové kreslo by nemalo používať osoby, ktoré nie sú schopné kontrolovať rovnováhu pri sedení.
- ▶ Osoba poskytujúca pomoc musí zabezpečiť stabilitu prístroja a skontrolovať, či je bočný rám správne umiestnený v držiaku bočného rámu pred použitím!
- ▶ Pri sedení na sprchovej stoličke a stojacej stanici musí byť osoba prítomná, aby poskytla pomoc!
- ▶ Ak sú časti sprchovej stoličky ohnuté alebo pokrivené, nemožno ich už používať!
- ▶ Všetky 4 nohy musia byť nastavené na rovnakú výšku a sprchová stolička musí pevne stáť na všetkých 4 nohách!

Záruka:

V súlade so zákonnými záručnými právami. Vylúčené zo záruky sú : Poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebením a poruchami, ktoré významne neovplyvňujú hodnotu alebo použiteľnosť zariadenia. Technické úpravy a prídavné zariadenia, ako aj nesprávne vykonávaná údržba rušia záruku a zodpovednosť za výrobok vo všeobecnosti. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny zamerané na zlepšenie technických vlastností.