

Vaňa na umývanie vlasov

Kat. číslo: 47020 - Vaňa na umývanie vlasov

Kat. číslo: 47020 - Vaňa na umývanie vlasov – set

- Nafukovacia vaňa
- Sprchovacie vrečko
- Pumpa

47020 - Vaňa na umývanie vlasov; 47050 - Vaňa na umývanie vlasov			
Materiál:	Vaňa, sprchovacie vrečko, odtoková hadica – PVC; hadica závesnej sprchy – nylon	Rozmery sprchovacieho vrečka:	Približne 50 x 33 cm, dĺžka hadice vrátane sprchy: približne 54 cm, objem cca 6 L
Rozmery vane:	Približne 60 x 50 x 17 cm	Váha:	Približne 600 g
Dĺžka hadice:	Približne 120 cm	Životnosť:	Približne 2 roky pri používaní v domácnosti*
Uskladnenie:	Suché a bezprašné prostredie		

*Ak potrebujete vaňu pre viacerých ľudí a na dlhšie použitie, máme pre Vás variantu z tvrdšieho plastu (47080 – Vaňa na umývanie vlasov „Profi“)

Náhradné diely a príslušenstvo:

47050-01 Pumpa

47070/47072 Sprchovacie vrečko biele/modré

Použitie:

Zdravé a vlasy, o ktoré je dobre postarané, sú základným kritériom pre pozitívny postoj k životu.

Vaňa na umývanie vlasov EXTRA je zdravotnícka pomôcka a je vytvorená pre pacientov na lôžku, aby si ľahko a pohodlne umyli vlasy priamo na lôžku.

Indikácia: Pacienti na lôžku, slabosť. Kontraindikácie: ochorenie uší, srdcová insuficiencia, poškodenie krčných stavcov a hlavy. V prípade pochybností sa obráťte na svojho ošetrojúceho lekára.

Popis produktu:

Vaňa na umývanie vlasov EXTRA je nafukovacia vaňa z vinylu. Súprava obsahuje integrovanú zátku s vypúšťacou hadicou, ako aj zavesené sprchovacie vrecko so sprchovacím nástavcom a príslušnou pumpou na nafukovanie. Položku smie používať iba oprávnený a vyškolený personál. Model by mal prísť do styku so zdravou, nezranenou pokožkou. Nie je určený na použitie nad rámec toho, čo je uvedené vyššie. Spoločnosť Sundo GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z takýchto konaní; riziko znáša výhradne používateľ.

Pred prvým použitím / údržbou:

Pred prvým použitím vizuálne skontrolujte produkt, ako aj pred každým použitím, či je nepoškodený. Pohyblivé časti musia byť dodatočne testované na hladký chod. V prípade príznakov poškodenia alebo opotrebenia sa vaňa na umývanie vlasov nesmie použiť. Nie je potrebná žiadna ďalšia údržba.

Použitie:

Vaňu na umývanie vlasov nafúknajte priloženou pumpou. Pripravte si veci na umývanie (2 uteráky, žinky, ošetrovacie prostriedky, prázdne vedro na vypustenie špinavej vody a ostatné veci, ktoré potrebujete). Matrac prikryte nepremokavou podložkou, oblečenie zásterou. Jeden uterák vložte do výrezu vo vani na umývanie vlasov.

Úplne zatlačte hlavovú časť postele a vložte vaňu na umývanie vlasov. Krk pacienta musí byť vo vystlanom výreze. Pred tým, ako začnete, prosím skontrolujte, či boli odstránené všetky veci ako náušnice, okuliare, načúvacie pomôcky atď. Ak je potrebné, chráňte oči a uši pacienta.

Sprchovacie vrecko naplňte teplou vodou (max. 38 ° C) a zaveste ju na háčik, alebo na posteľ.

Otvorte a zatvorte kohútik sprchovacieho vrecka na nastavenie rýchlosti vody.

Teraz môžete umývať vlasy ako zvyčajne. Opatrne opláchnite vlasy, umiestnite hadičku do prázdneho vedra a vytiahnite zátku, aby ste vyprázdnili špinavú vodu.

Keď vypustíte všetku vodu, zdvihnite pacienta a vyberte vaňu. Neťahajte za nafúknuté trubice, môže dôjsť k poškodeniu zvarov.

Teraz dôkladne vysušte vlasy druhým uterákom. Po použití musí byť vaňa na umývanie vlasov dôkladne vysušená, potom ju zložte.

Čistenie/dezinfekcia:

Pri čistení nepoužívajte ostré, abrazívne predmety alebo čistiace prostriedky. Všetky časti sa najlepšie čistia vlhkou handričkou za použitia jemných domácich čistiacich prostriedkov.

Predtým ako vaňu na vlasy odložíte, musí byť úplne vysušená. Nevysušujte ju na ohrievači ani na priamom slnečnom svetle.

Vaňa na umývanie vlasov sa môže dezinfikovať komerčným dezinfekčným prostriedkom bez chlóru (dezinfekčné utierky). Dôležité upozornenie: Pri použití dezinfekčných prostriedkov je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

Bezpečnostné inštrukcie:

Používajte iba teplú vodu do 38 ° C, aby ste predišli popáleninám!

Nenechávajte pacienta samého s naplnenou vaňou

Pravidelne kontrolujte tesnosť vane

Nádobu neprenášajte pred úplným vyprázdnením!

Neťahajte za trubice, mohlo by dôjsť k poškodeniu zvarov!

Umývadlo na vlasy nie je hračka a nesmie sa používať na iné účely

Závesné lano sprchy musí byť bezpečne pripevnené

Nepoužívať pre viaceré osoby!

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Výnimkou zo záruky sú chyby vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, zámeru, nedbanlivosti alebo nesprávnej manipulácie alebo použitia a nedostatkov, ktoré ovplyvňujú hodnotu alebo použiteľnosť nástroja len zanedbateľne. Vyhradzuje si právo na zmeny, ktoré slúžia technickému zlepšeniu.