

Inštrukcie na používanie:

! Bezpečnostné inštrukcie:

- ▶ Vankúše nafukovacie nesmú byť vystavené priamo slnku alebo iným zdrojom tepla.
- ▶ Životnosť je približne 10 rokov.
- ▶ Vankúše je možné používať v rozmedzí teplôt 10 - 60 ° C.
- ▶ Nepoužívajte ich ak sú krehké a poškodené .
- ▶ Maximálne zaťaženie je 100 kg.

Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Vylúčené zo záruky: Škody spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebením a tiež chybami, ktoré len zanedbateľne ovplyvňujú hodnotu alebo použiteľnosť produktu. Technické zmeny a doplnky, ako aj neodborné údržbové práce vedú k ukončeniu platnosti záruky a všeobecnej zodpovednosti za výrobok. Vyhradzuje si právo vykonávať zmeny, ktoré slúžia technickému zlepšeniu.

Dostupné ako príslušenstvo:

Pumpa k nafukovaciemu vankúšu, gumená 41500

Froté poťah na nafukovacie vankúše, jednotlivito:

- 41540 biela cca 40 cm
- 41541 svetlo modrá cca 40 cm
- 41543 biela cca 43 cm
- 41544 svetlo modrá cca 43 cm
- 41545 biela cca 45 cm
- 41546 svetlo modrá cca 45 cm
- 41548 biela cca 50 cm
- 41549 svetlo modrá cca 50 cm

Jednorazový poťah na nafukovacie vankúše

41550 biely, flísový poťah, vhodný na všetky nafukovacie vankúše od Ø cca 40 - 45 cm, balenie po 5ks

Nafukovací vankúš s jednorazovým poťahom:

Položka č. 41 240 / Ø cca 40 cm, Ø vnútri cca 13 cm

Položka č. 41 242 / Ø cca 43 cm, Ø vnútri cca 14 cm

Položka č. 41 245 / Ø cca 45 cm, Ø vnútri cca 15 cm

Položka č. 41 250 / Ø cca 50 cm, Ø vnútri cca 16 cm
(bez poťahu)

Len nafukovacie vankúše,

Položka č. 41 440 / Ø cca 40 cm, Ø vnútri cca 13 cm

Položka č. 41 442 / Ø cca 43 cm, Ø vnútri cca 14 cm

Položka č. 41 445 / Ø cca 45 cm, Ø vnútri cca 15 cm

Položka č. 41 450 / Ø cca 50 cm, Ø vnútri cca 16 cm



Účel použitia: Na krátkodobé uvoľnenie tlaku v prípade problémov so sedením.

Indikácia: Pomoc na zmiernenie tlaku a fyziologicky vylepšené polohovanie / sedenie v akútnych situáciách. V prípade perineálneho rezu, indikácií prostaty, kostrče, análnych / hemoroidných, močových mechúrov alebo iných indikácií (pooperačných alebo konzervatívnych) nafukovací vankúš znateľne zlepšuje existujúce deficity pri sedení. Je nevyhnutné, aby sa pacient mohol stále pohybovať, aby mohol v prípade potreby zmierniť tlak.

Kontraindikácia: Nepoužívajte nafukovací vankúš dlhšiu dobu, pretože by to mohlo viesť k vzniku edému.

Prihláška:

► Nafukovací vankúš sa nafukuje ručne alebo pomocou pumpy (položka č. 41500).

Nemali by ste nafukovať príliš silno.

► Nafukovací vankúš sa môže používať iba s poťahom alebo iným priedušným poťahom. (41540-41550) *

► Pri polohovaní pacienta dbajte na to, aby sa neporanil o ventil.

► Ventil vždy nechajte smerovať od tela.

Čistenie a dezinfekcia:

► Najlepšie je na čistenie použiť mydlovú vodu a mäkkú handričku.

► Neponárajte nafukovacie vankúše do tekutín.

► V prípade potreby je možné nafukovací vankúš dezinfikovať komerčne dostupným bezchlórovým dezinfekčným prostriedkom.

Dôležité: Pri použití dezinfekčných prostriedkov je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

Výstraha pre alergikov!

Prírodný gumový latex obsiahnutý vo nafukovacom vankúši môže u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie.

* Dostupné ako príslušenstvo

Distribútor pre SR: VIDRA a spol. s r. o., Štrková 8, 011 96 Žilina

Tel: 041/507 10 10, email: info@vidra.sk, web: www.vidra.sk

Sundo Homecare GmbH, D-30916 Isernhagen, www.sundo-homecare.de

Položka č. 41 240 / nafukovací vankúš s jednorazovým návlekom			
Vonkajší ø	40	Vnútorý ø	13

Položka č. 41 242 / nafukovací vankúš s jednorazovým návlekom			
Vonkajší ø	43	Vnútorý ø	14

Položka č. 41 245 / nafukovací vankúš s jednorazovým návlekom			
Vonkajší ø	45	Vnútorý ø	15

Položka č. 41 250 / nafukovací vankúš (bez návleku)			
Vonkajší ø	50	Vnútorý ø	16

Položka č. 41 440 / len nafukovací vankúš			
Vonkajší ø	40	Vnútorý ø	13

Položka č. 41 442 / len nafukovací vankúš			
Vonkajší ø	43	Vnútorý ø	14

Položka č. 41 445 / len nafukovací vankúš			
Vonkajší ø	45	Vnútorý ø	15

Položka č. 41 450 / len nafukovací vankúš			
Vonkajší ø	50	Vnútorý ø	16