

STERISEPT PLUS

Koncentrovaný dezinfekčný a čistiaci prípravok na povrchy zdravotníckych pomôcok



VŽDY POMÔŽEME

- Bez obsahu fenolov, aldehydov a fosfátov
- Široké spektrum mikrobiologickej účinnosti
- Dobré čistiace vlastnosti a materiálová kompatibilita

Sterisept Plus je tekutý koncentrát na dezinfekciu a čistenie neinvazívnych zdravotníckych pomôcok a ďalších zmačateľných povrchov. **Sterisept Plus** kombinuje čistenie aj dezinfekciu, čím ho robí univerzálnym čistiacim dezinfektom pre všetky povrchy v zdravotníckej oblasti.

Má zloženie bez obsahu alkoholu a je veľmi vhodný na povrchy v blízkosti pacienta a zdravotnícky inventár, ktorý je citlivý na prípravky na báze alkoholu.

Vďaka špeciálne vybraným aktívnym látkam a povrchovo aktívnym látkam, má dobrú materiálovú kompatibilitu s dobrými čistiacimi vlastnosťami. **Sterisept Plus** je vhodný na použitie v nemocniciach, potravinárskom a farmaceutickom priemysle, veterinárnej oblasti, laboratóriách, dentálnych klinikách a iných zdravotníckych inštitúciách. Krátke kontaktné časy a nízke koncentrácie umožňujú jeho ekonomické použitie. Ideálny produkt pri zvýšených požiadavkách na hygienu, kde dodatočná ochrana je potrebná.

Sterisept Plus má široké spektrum baktericídnej (vrátane MRSA, VRE), mykobaktericídnej (vrátane Mycobacterium avium a Mycobacterium terrae), fungicídnej a levurocídnej účinnosti. Produkt je účinný aj proti vírusom (vrátane HBV, HIV, HCV, Vaccinia a Rota).


POUŽITIE

Odporúčané dávkovanie: 0,25 – 0,5 % v závislosti na požadovanej účinnosti.

ZLOŽENIE

100 g produktu obsahuje účinné látky: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 12,5g ; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 12,5g

Účinnosť	Normy	Kontaktný čas / koncentrácia		
		5 MIN	15 MIN	30 MIN
Baktericídna (vr. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561	0,25%		
	EN16615			0,5%
Levurocídna	EN13624	0,25%		
	EN16615			0,5%
Mykobaktericídna	EN14348		0,5%	
Všetky obalené vírusy	EN14476	0,5%	0,25%	
Rotavírus	EN14476	0,5%		

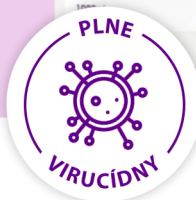

Sterisept Plus je koncentrovaný prípravok. Pracovný roztok pripravte zriedením požadovanej koncentrácie vo vode (izbovej teploty). Napríklad rozriedte 5 ml Sterisept Plus v 995 ml vody z vodovodu, aby ste získali 0,5 % pracovný roztok.

Na ošetrované povrchy naneste dostatočné množstvo hotového pracovného roztoku pomocou utierky alebo handričky. Zabezpečte úplné pokrytie. Doba účinku závisí od mikroorganizmov. Ošetrené povrchy nie je potrebné oplachovať.

Pripravený pracovný roztok je použiteľný počas 30 dní. Je potrebné ho držať v tesne uzatvorenej nádobe pri izbovej teplote. **Sterisept Plus** má dobrú materiálovú kompatibilitu s povrchmi vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele, skla, hliníka, medi, mosadze, keramiky, dlažby, linolea, PVC, gumy, plastov a silikónu.

UPOZORNENIA

Škodlivý po požití. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (orálne). Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.



BALENIE

11 dávkovacia fľaša
5l kanister

Katalógové číslo

551010175
551010179