

# Virospray

Sporicídny dezinfekčný a  
čistiaci prostriedok

Virospray je sporicídny dezinfekčný a čistiaci prostriedok určený na čistenie a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok. Vhodný na čistenie a dezinfekciu povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

## Kľúčové výhody

- Účinok od 30 sekúnd. (EN 16615)
- Čistenie a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok utieraním na vlhko vrátane povrchov endokavitálnej ultrazvukovej sondy
- Vyšší stupeň dezinfekcie
- Čistenie a dezinfekcia povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami

## Zloženie

Etanol: 42 % (m/m) [CAS: 64-17-5], Propan-2-ol: 22 % (m/m) [CAS: 67-63-0], N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín: 0,12 % (m/m) [CAS: 2372-82-9]

## Charakteristika

Vzhľad: tekutina, pH: 7

## Mikrobiologické vlastnosti

Účinky	Normy	Kmene	Čas pôsobenia	
			Čisté podmienky	Špinavé podmienky
Baktericídny	EN 16615	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 sekúnd	2 min
	EN 13727		2 min	5 min
	EN 14561		5 min	
	EN 17387	-		
	EN 13697	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>E. coli</i>	-	
	EN 1276	<i>Enterococcus faecium</i> (VRE)	-	
	EN 13727	-		
Levurocídny	EN 16615	<i>Candida albicans</i>	30 sekúnd	2 min
	EN 13624		5 min	10 min
	EN 14562		5 min	10 min
	EN 17387		-	5 min
	EN 1650		-	5 min
	EN 13697		-	5 min
	EN 13624	<i>Candida auris</i>	-	5 min
Fungicídny	EN 13624	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min	10 min
	EN 14562		-	5 min
	EN 17387			
	EN 1650			
	EN 13697			
Virucidny	EN 14476	<i>Poliovirus</i> , <i>Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i> , <i>Rotavirus</i>	5 min	-
	EN 16777	<i>Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i>	10 min	10 min
Tuberkulocídny	EN 14348		5 min	5 min
	EN 14563			
Mykobaktericídny	EN 14348	<i>Mycobacterium avium</i>	5 min	10 min
Sporicídny proti <i>Clostridium difficile</i>	EN 17126	<i>Clostridium difficile</i>	-	10 min
Sporicídny	EN 17126	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus cereus</i>	10 min	15 min



## Použitie

Prvé použitie spreja:

- Použite vhodné osobné ochranné prostriedky a odistite sprej.

1. Nastriekajte sprej Virospray rovnomerne na suchú netkanú jednorazovú utierku
2. Utrite povrch zdravotníckej pomôcky, ktorú čistíte.
3. Čas pôsobenia: podľa požadovaného antimikrobiálneho účinku.
4. Neoplachujte.\*
5. Odhodte použitú utierku.
6. Úkon podľa potreby zopakujte.

\* Nevyžaduje sa opláchnutie, pokiaľ nie je uvedené inak výrobcom čistenej povrchovej úpravy alebo v prípade povrchov, ktoré sú v kontakte s kožou a sliznicami.

## Bezpečnostné opatrenie pri použití

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt na profesionálne použitie – dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku a informácie o produkte. Zdravotnícka pomôcka triedy IIb.



Objednávkové číslo	Názov	Fakturačná jednotka
551020084	Virospray 1l	ks
551020085	Virospray 5l	ks