

# DDN 9

Vysoko účinný neutrálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok



VŽDY POMÔŽEME

DDN 9 je vysoko účinný neutrálny dezinfekčný a čistiaci roztok určený na profesionálne čistenie a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok. Je ideálny pre použitie pomôcok z operačných sál, endoskopie, oftalmológie a kontaktológie.

## Kľúčové výhody

- Overená účinnosť v prípade biofilmu *Pseudomonas aeruginosa*
- Integrita inštrumentária zaručená počas 72 hodín v kúpeli s ponorením
- Kompatibilný so širokou škálou materiálov
- Použiteľný v ultrazvukových čističkách

## Príprava roztoku

- Použite vhodné osobné ochranné prostriedky (ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov).
- Zriedte požadovaný objem DDN 9 v 5 litroch vody z vodovodu a homogenizujte roztok (pozri tabuľku o riedení).

dávka na 5 L	Koncentrácia roztoku		
	0,5 %	2 %	5 %
	25 ml	100 ml	250 ml

## Mikrobiologické vlastnosti

Účinky	Normy	Kmene	Koncentrácia	Čas pôsobenia
Baktericidny	EN 13727	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0,5 %	5 minút
	EN 14561		0,5 %	15 minút
	EN 13697	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	0,5 %	5 minút
	EN 1276		0,25 %	5 minút
	EN 13727	<i>Enterococcus faecium (VRE)</i>	0,5 %	5 minút
Levurocidny	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	0,5 %	5 minút
	EN 14562		0,5 %	15 minút
	EN 1650		0,25 %	5 minút
	EN 13697		0,5 %	5 minút
	EN 13624	<i>Candida auris</i>	0,5 %	5 minút
Virucidny proti obaleným vírusom	EN 14476, EN 17111	<i>virus Vaccinia</i>	0,5 %	15 minút
Účinnok na PRV, herpetický vírus	EN 14476	<i>vírus PRV (model vírusu hepatitídy B, herpetický vírus)</i>	0,5 %	5 min
Účinnok na HIV, DBV	EN 14476	<i>Vírus DBV (model vírusu hepatitídy C), HIV</i>	0,5 %	5 minút
Tuberkulocidny	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i>	2 %	60 minút
			5 %	15 minút
	EN 14563	<i>Mycobacterium terrae</i>	2 %	60 minút
			5 %	15 minút



Objednávkové číslo	Názov	Fakturačná jednotka
551030162	DDN 9 1l	ks
551030163	DDN 9 5l	ks

## Použitie

1. Znečistené zdravotnícke pomôcky úplne ponorte do roztoku.
2. Očistite zdravotnícke pomôcky kefkou a podľa potreby tampónom.
3. Čas pôsobenia: podľa požadovaného antimikrobiálneho účinku (pozri časť o vlastnostiach dezinfekčného prostriedku).
4. Dôkladne opláchnite.

## Zloženie

Katiónové surfaktanty, Neiónové surfaktanty, Komplexotvorné látky

## Vlastnosti

Vzhľad: tekutina, pH pri 0,5 %: 7

## Bezpečnostné opatrenie pri použití

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt na profesionálne použitie – riadte sa bezpečnostnými opatreniami pri použití. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku a informácie o produkte. Zdravotnícka pomôcka triedy IIb.



0459